



Technical Specifications

Kepler NurseAssist App

Detecte las caídas y las salidas no autorizadas de la cama inmediatamente en tiempo real.

La aplicación preinstalada en la cámara MOBOTIX c71 NurseAssist con tecnología de sensor inteligente MOBOTIX es compatible con hospitales, centros de descanso y residencias de ancianos y ofrece una manera eficaz y rentable de proteger a los pacientes y a quienes necesitan atención, de forma automática e ininterrumpida.

- Control fiable del bienestar de los pacientes.
- El software integrado basado en IA detecta incidentes en tiempo real.
- Alertas automáticas al personal en caso de alarma.
- Posibilidad de diálogo directo con el paciente a través de la función de micrófono/audio integrada.
- Instalación sencilla y respetuosa con la intimidad.
- Funcionamiento conforme al RGPD mediante la ocultación controlada por eventos de imágenes en directo y grabadas.

AVISO! La Kepler NurseAssist App solo está disponible preinstalada en la cámara MOBOTIX c71 NurseAssist.



BeyondHumanVision

MOBOTIX

Especificaciones de la aplicación

Información general de la aplicación

Nombre del producto	Kepler NurseAssist App
Código de pedido	solo disponible en un paquete con la cámara MOBOTIX M73 (Mx-M73)
Cámaras MOBOTIX compatibles	MOBOTIX c71 NurseAssist (preinstalada)
Versión de firmware mínima de la cámara	v7.3.4.x
Compatibilidad con MxManagementCenter	<ul style="list-style-type: none">▪ mín. MxMC v2.7▪ Configuración: Se requiere una licencia de configuración avanzada▪ Buscar Evento: Licencia de interfaz de Smart Data incluida

Características generales

Funciones de la versión básica	<ul style="list-style-type: none">▪ supervisión del bienestar de los pacientes en habitaciones privadas, pasillos y zonas comunes de centros sanitarios.▪ minimización de los tiempos de reacción gracias a la detección descentralizada de caídas de última generación.▪ prevención de accidentes mediante eventos de persona tumbada, persona en la cama y persona fuera de la cama.▪ detección y localización automatizadas de la cama en la habitación del paciente.▪ funcionamiento conforme a GDPR mediante oscurecimiento controlado por eventos de las imágenes en directo y grabadas.▪ Enmascaramiento dinámico de una persona en la cama como medida adicional de protección de la intimidad.
Funciones de la versión extendida	<p>Licencia plug-in necesaria para ampliar las notificaciones de estado y alarma de NurseAssist con las siguientes funciones:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ La persona se sienta en el borde de la cama▪ La persona ha salido de la habitación

- La persona ha entrado en la habitación
- La persona ha entrado en el cuarto de baño / está en el cuarto de baño
- No se reconoce la cama / no está presente

AVISO! La licencia Plug-In requiere MOBOTIX c71 NurseAssist Smart Sensor o Kepler NurseAssist Certified App con licencia.

Número máximo de áreas de detección	1
Objetos reconocidos	Personas
Tipos de sensor de imagen compatibles	Día/Noche (predeterminado en MOBOTIX M73)
MxMessageSystem compatible	Sí
Eventos de MOBOTIX	Sí
Eventos de ONVIF	Sí (evento de mensaje genérico)

Requisitos de escena

Tamaño de la habitación	máx 25 m ² suponiendo que la habitación es casi cuadrada (por ejemplo, de 5 x 5 m) con un radio de 4 m; no funciona con salas largas y estrechas.
Posición de instalación necesaria (cámara)	montaje en el techo
Altura de instalación recomendada (cámara)	2,0m - 3,5m
Distancia de montaje desde la cama	0,5m - 3,0m
Distancia de montaje desde la pared	> 70 cm

Especificaciones técnicas de la aplicación

Aplicación sincrónica/asíncrona	asincrónica
Ejecución simultánea de	No

Especificaciones técnicas

Kepler NurseAssist App

otras aplicaciones

Precisión	mín. 99 % (teniendo en cuenta los requisitos de la escena y sin objetos que bloqueen la vista)
-----------	--

Frecuencia de fotogramas procesada	Típ. 0,20 fps
------------------------------------	---------------

Tiempo medio de alarma	Típ. 30 segundos
------------------------	------------------

MOBOTIX

BeyondHumanVision

[ES_02/25](#)

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX es una marca comercial de MOBOTIX AG registrada en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Sujeto a cambios sin previo aviso. MOBOTIX no asume ninguna responsabilidad por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento. Todos los derechos reservados. ©MOBOTIX AG 2023